

ActiSperm® АктиСперм®

Специальная вагинальная
смазка (лубрикант),
способствующая
зачатию
pH 7,2

Специализированная смазка, которая сохраняет жизнеспособность
сперматозоидов и увеличивает вероятность зачатия ребенка

Что такое ACTISPERM® Актисперм

Миллионы пар по всему миру пытаются зачать ребенка, планируя половой акт во время овуляции. Однако в связи с тем фактом, что в каждом цикле лишь небольшому проценту пар удастся зачать, эта процедура создает стрессовую ситуацию для пары, которая стремится к рождению ребенка. Стресс и психологическое давление часто приводят к появлению сухости влагалища, которая снижает шансы зачатия, а также приводит к болезненному половому акту из-за недостаточного вагинального смазывания (диспареуния).

Эти пары будут искать смазки, облегчающие половой акт, но они не знают, что использование обычных смазок еще больше снижает шансы на зачатие. Это связано с тем, что все обычные смазки создают токсичную среду во влагалище, которая влияет на жизнеспособность сперматозоидов.

ACTISPERM® (Актисперм) является водорастворимым смазочным гелем, содержащим специально подобранные компоненты, которые создают во влагалище благоприятные условия для сперматозоидов, повышая их подвижность и жизнеспособность. Гель имеет pH 7,2, который обеспечивает жизнеспособность, целостность и эффективность сперматозоидов, увеличивая вероятность зачатия.

ПРОДУКТ	НАЗНАЧЕНИЕ	ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА	СВОЙСТВА
ActiSperm® (Актисперм) Специальная вагинальная смазка (лубрикант), способствующая зачатию	Для смазывания влагалища и создания условий, необходимых для повышения подвижности и жизнеспособности сперматозоидов, чтобы увеличить вероятность зачатия	Репродуктивный возраст	Специальный водорастворимый вагинальный смазывающий гель, который создает благоприятные условия для спермы во влагалище, имитируя его естественную секрецию. Он имеет соответствующее значение pH 7,2, которое обеспечивает жизнеспособность сперматозоидов, в то время как специальные натуральные компоненты обеспечивают целостность и эффективность сперматозоидов

Состав: вода, гидроксизтилцеллюлоза, арабиногалактан, дигидрофосфат натрия дигидрат, хлорид натрия, метилпарабен, дигидрофосфат калия дигидрат, пропилпарабен



ActiSperm® АктиСперм®

Специальная вагинальная
смазка (лубрикант),
способствующая
зачатию
pH 7,2

Показания к применению

ACTISPERM® (Актисперм) – смазывающий вагинальный гель для использования перед половым актом, предназначенный для смазывания влагалища и создания благоприятных условий, которые позволяют сохранить жизнеспособность сперматозоидов и увеличить вероятность зачатия.

Нанесение

Гель ACTISPERM® (Актисперм) можно наносить за 15 минут до полового акта. Введение геля до полового акта улучшает его распределение во влагалище.

- 1 Удерживайте аппликатор за широкий конец. Направьте узкий конец аппликатора вниз и потрясите его, чтобы содержимое аппликатора переместилось к кончику.
- 2 Удерживайте аппликатор кончиком вниз. Отломайте защитный колпачок на кончике, чтобы открыть аппликатор (рисунок 1).
- 3 Находясь в положении лежа, вставьте кончик аппликатора глубоко во влагалище (рисунок 2) и нажмите на широкий конец аппликатора, чтобы ввести необходимое количество геля ACTISPERM® (Актисперм). Удерживайте аппликатор в нажатом состоянии и извлеките из влагалища.
- 4 Если вы не использовали весь объем геля ACTISPERM® (Актисперм), содержащегося в аппликаторе, не храните его для дальнейшего использования. Неиспользованный продукт следует выбросить.
- 5 Любое количество геля ACTISPERM® (Актисперм), которое может вытечь из влагалища после нанесения, можно легко удалить, протерев вульву сухой бумажной салфеткой.

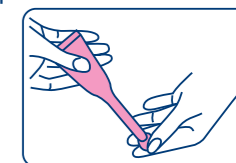


Рисунок 1

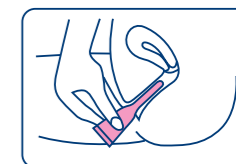


Рисунок 2

Меры предосторожности

- Гель ACTISPERM® (Актисперм) не является контрацептивом. Он не уничтожает сперматозоиды и не вмешивается в их функцию.
- Если гель ACTISPERM® (Актисперм) вызвал раздражение или дискомфорт, его применение необходимо прекратить. Симптомы обычно пропадают после прекращения применения продукта. Если симптомы сохраняются, обратитесь к врачу.
- Не используйте продукт, если у вас есть активные вагинальные инфекции и повреждения. Если вы недавно перенесли операцию, перед использованием геля проконсультируйтесь с врачом.
- Храните при комнатной температуре (от +15° до +25°С) в защищенном от света месте, вдали от детей.

Упаковка

6 предзаполненных аппликаторов объемом 5 мл.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:



«INTERMED S.A.»
IOULIA & IRENE TSETI Pharmaceutical Laboratories S.A.
27 Kalyftaki str, 145 64 Kifissia- GREECE, ГРЕЦИЯ
тел.: +30-210-6253905, факс.: +30-210-6253906,
e-mail: intermed@intermed.com.gr - www.intermed.com.gr

Произведено в ЕС в соответствии с требованиями надлежащей медицинской практики (GMP)



ЕВАФАРМ

Организация, уполномоченная изготовителем
на принятие претензий от потребителя:

ООО «ЭВАФАРМ», Россия, 127576 г. Москва,
ул. Новгородская, д. 1, корпус Г, офис 214.
Тел.: +7 495 789 48 96,
Эл. почта: info@evapharm.ru,
www.evapharm.ru

Срок годности: 3 года. Годен до: см. на упаковке.
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.55.001.E.009060.11.13 от 14.11.2013 г.

