


EVA LACTIC® Эва Лактик

**Регулятор вагинального pH,
содержащий молочную
кислоту и гликоген,
для немедленного и долгосрочного
регулирования вагинального pH**



ВАГИНАЛЬНЫЙ ГЕЛЬ

- * Борется с нежелательными вагинальными выделениями и раздражением влагалища
- * Восстанавливает и поддерживает естественный баланс влагалища
- * Содержит экстракт ромашки и алоэ

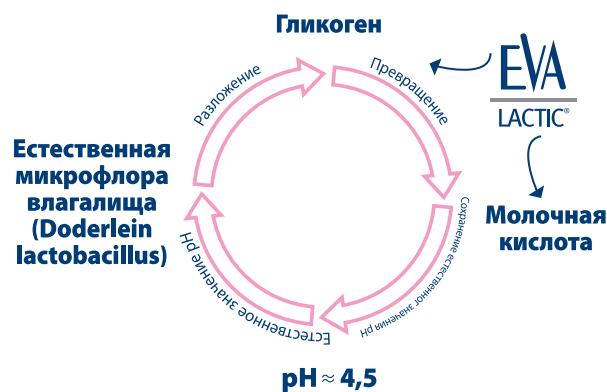

Вагинальный гель **EVA LACTIC® (Эва Лактик)** содержит молочную кислоту, естественный регулятор вагинального pH, а также гликоген, единственный субстрат, который может быть использован существующими лактобациллами (молочнокислыми бактериями). Поэтому **EVA LACTIC® (Эва Лактик)** сразу после использования восстанавливает вагинальный pH до естественного кислого значения и обеспечивает лактобациллы питательным материалом, что позволяет им развиваться и вырабатывать молочную кислоту, которая будет поддерживать естественный вагинальный pH продолжительный период времени. Механизм сохранения естественного вагинального баланса и вклад в данный процесс **EVA LACTIC® (Эва Лактик)** проиллюстрирован на следующей схеме.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ	НАЗНАЧЕНИЕ
Молочная кислота	Быстрое восстановление нарушенного вагинального pH до его естественного кислого значения
Гликоген – глюкоза	Специальный питательный субстрат, который обеспечивает развитие вагинальных лактобацилл для сохранения вагинального pH продолжительный период времени
Экстракты ромашки и алоэ	Быстрое облегчение симптомов раздражения (зуд, жжение) и красноты

Состав: дистиллированная вода, пропиленгликоль, молочная кислота (90%), гидроксипропилметилцеллюлоза, экстракт ромашки лекарственной, метилпарабен, гидросульфат натрия, гликоген, динатриевая соль ЭДТА, глюкоза, пропилпарабен, алоэ вера порошок (200:1).

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Для регулирования вагинального pH и восстановления его естественного кислого значения в случаях нарушений, вызванных бактериальными или грибковыми вагинальными инфекциями; долговременным лечением антибиотиками или контрацептивами; после менструального периода.
- Для повышения естественной защиты организма и предотвращения проблем, связанных с нарушением вагинального pH, особенно в период менопаузы.

ДОЗИРОВКА

Терапевтическое использование: в случае вагинита как дополнение к медикаментозному лечению и после долговременного лечения антибиотиками или применения контрацептивов – 1 раз в день в течение 7 дней.

Периодическое использование: во время менопаузы, когда выработка гликогена, молочной кислоты и лактобацилл уменьшается в связи со снижением уровня эстрогенов – 1 раз в день в течение 3 дней.

Профилактическое использование: для поддержания вагинального здоровья – 1 раз в неделю; в случае менструального периода – 1 раз в день в течение 3 дней. Вагинальные гели предпочтительно применять на ночь перед, сном.

ПРИМЕНЕНИЕ

- 1 Удерживайте аппликатор за широкий конец. Направьте узкий конец аппликатора вниз и потрясите его несколько минут, чтобы содержимое аппликатора переместилось к кончику.
- 2 Удерживайте аппликатор кончиком вниз и отломайте защитный колпачок на кончике, чтобы открыть аппликатор (рисунок 1).
- 3 Находясь в положении лежа, вставьте кончик аппликатора глубоко во влагалище (рисунок 2) и нажмите на широкий конец аппликатора, чтобы внести необходимое количество геля **EVA LACTIC® (Эва Лактик)**. Удерживайте аппликатор в нажатом состоянии и извлеките из влагалища.
- 4 Если вы не использовали весь объем геля **EVA LACTIC® (Эва Лактик)**, содержащегося в аппликаторе, не храните его для дальнейшего использования. Неиспользованный продукт следует выбросить.
- 5 Любое количество геля **EVA LACTIC® (Эва Лактик)**, которое может вытечь из влагалища после нанесения, можно легко удалить, протерев вульву сухой бумажной салфеткой.

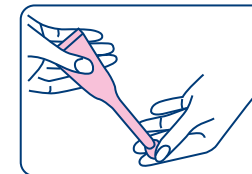


Рисунок 1

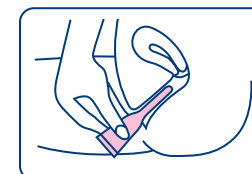


Рисунок 2

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

После применения **EVA LACTIC® (Эва Лактик)** во влагалище может ощущаться жжение вследствие восстановления pH до кислого значения. Это не является противопоказанием для дальнейшего применения средства. При следующем применении средства жжение обычно пропадает. В случае продолжительного дискомфорта или раздражения рекомендуется прекратить применение средства и обратиться к врачу. Хранить при комнатной температуре (от +15° до +25°С) в сухом, недоступном для детей месте.

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА И УПАКОВКА

Вагинальный гель 9 предварительно заполненных одноразовых аппликаторов массой 5 г.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:



«INTERMED S.A.»
IOULIA & IRENE TSETI Pharmaceutical Laboratories S.A.
27 Kalyftaki str, 145 64 Kifissia- GREECE, ГРЕЦИЯ
тел.: +30-210-6253905, факс.: +30-210-6253906,
e-mail: intermed@intermed.com.gr -
www.intermed.com.gr



Произведено в ЕС в соответствии с требованиями надлежащей медицинской практики (GMP)



EVAPHARM

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителя:
ООО «ЭВАФарм», Россия, 127576 г. Москва,
ул. Новгородская, д. 1, корпус Г, офис 214.
Тел.: +7 495 789 48 96,
Эл. почта: info@evapharm.ru,
www.evapharm.ru



Свидетельство о государственной регистрации
№ RU.77.99.55.001.E.009064.11.13
от 14.11.2013 г.

Срок годности: 3 года.
Годеи до: см. на упаковке.