

# EVA

## MOIST® LONG ACTING

### Эва Мойст

**Увлажняющий вагинальный  
гель длительного действия,  
обогащенный гиалуроновой кислотой**



pH 3,0

\* Длительное увлажнение и защита

\* Быстрое облегчение симптомов  
вагинальной сухости

**Быстро восстанавливает естественную влажность влагалища,  
поддерживая его в течение нескольких дней,  
и облегчает симптомы вагинальной сухости**

ПРОДУКТ	НАЗНАЧЕНИЕ	ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА	СВОЙСТВА
<b>EVA</b> MOIST® LONG ACTING (Эва Мойст) Вагинальный гель длительного действия, увлажняющий слизистую оболочку влагалища	Для долгосрочного поддержания естественной влажности влагалища. Одного нанесения достаточно для увлажнения и защиты вагинального эпителия в течении 2-3 дней	Подходит для женщин всех возрастов, особенно женщин в период менопаузы	Защитная пленка, образующаяся на слизистой оболочке влагалища, сохраняет влажность продолжительный период времени, помогая облегчить симптомы вагинальной сухости. Средство не содержит гормонов и фармацевтических субстанций. Гель EVA MOIST® LONG ACTING (Эва Мойст) особенно эффективен для борьбы и профилактики атрофического вагинита, вызванного сухостью влагалища



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- 1 Гель **EVA MOIST® LONG ACTING (Эва Мойст)** вводят во влагалище с помощью вагинального аппликатора. Гель **EVA MOIST® LONG ACTING (Эва Мойст)** используют каждые 2-3 дня, предпочтительно на ночь, перед сном.
- 2 Удерживайте аппликатор за широкий конец. Направьте узкий конец аппликатора вниз и потрясите его 5-6 раз, чтобы содержимое аппликатора переместилось к кончику.
- 3 Удерживайте аппликатор кончиком вниз и отломайте защитный колпачок на кончике, чтобы открыть аппликатор (рисунок 1).
- 4 Находясь в положении лежа, вставьте кончик аппликатора глубоко во влагалище (рисунок 2) и нажмите на широкий конец аппликатора, чтобы внести необходимое количество геля **EVA MOIST® LONG ACTING (Эва Мойст)**. Удерживайте аппликатор в нажатом состоянии и извлеките из влагалища.
- 5 Если вы не использовали весь объем геля **EVA MOIST® LONG ACTING (Эва Мойст)**, содержащегося в аппликаторе, не храните его для дальнейшего использования. Неиспользованный продукт следует выбросить.
- 6 Любое количество геля **EVA MOIST® LONG ACTING (Эва Мойст)**, которое может вытечь из влагалища после нанесения, можно легко удалить, протерев вульву сухой бумажной салфеткой.

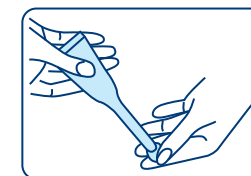


Рисунок 1

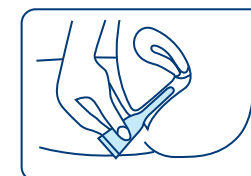


Рисунок 2

**Состав:** дистиллированная вода, глицерин, минеральное масло, поликарбофил, гидрогенизированный пальмовый глицерид, карбопол 974Р, гидросульфат натрия, сорбиновая кислота, гиалуронат натрия, ромашка сушеная, алоэ сушеное.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

После применения **EVA MOIST® LONG ACTING (Эва Мойст)** во влагалище может ощущаться временное жжение вследствие восстановления pH до кислого значения. Это не является противопоказанием для дальнейшего применения средства. При следующем применении средства жжение обычно пропадает. В случае продолжительного дискомфорта или раздражения рекомендуется прекратить применение средства и обратиться к врачу. Хранить при комнатной температуре (от +15° до +25°С) в сухом, недоступном для детей месте.

**НЕ СОДЕРЖИТ гормонов и фармацевтических субстанций**

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:



«INTERMED S.A.»  
 IOULIA & IRENE TSETI Pharmaceutical Laboratories S.A.  
 27 Kalyftaki str, 145 64 Kifissia- GREECE, ГРЕЦИЯ  
 тел.: +30-210-6253905, факс.: +30-210-6253906,  
 e-mail: intermed@intermed.com.gr -  
 www.intermed.com.gr



Произведено в ЕС в соответствии  
 с требованиями надлежащей  
 медицинской практики (GMP)



Организация, уполномоченная изготовителем  
 на принятие претензий от потребителя:  
 ООО «ЭВАФАРМ», Россия, 127576 г. Москва,  
 ул. Новгородская, д. 1, корпус Г, офис 214.  
 Тел.: +7 495 789 48 96,  
 Эл. почта: info@evapharm.ru,  
 www.evapharm.ru



Свидетельство о государственной  
 регистрации  
 № RU.77.99.55.001.E.009065.11.13  
 от 14.11.2013 г.

Срок годности: 3 года.  
 Годен до: см. на упаковке.