

# EVA

## RESTORE®

(Эва Рестор)

С гиалуроновой кислотой



ВАГИНАЛЬНЫЙ ГЕЛЬ

### Помогает при лечении атрофической и поврежденной слизистой оболочки влагалища и регулирует вагинальный pH

Вагинальный гель **EVA RESTORE® (Эва Рестор)** помогает регенерировать и восстановить чувствительный вагинальный эпителий, находящийся в атрофическом или поврежденном состоянии по причине операции или вагинита. **EVA RESTORE® (Эва Рестор)** ускоряет выздоровление слизистой оболочки влагалища после вагинальной хирургии, дистрофии, вызванной химиотерапией или излучением, вагинальной сухости, вызванной атрофическим вульвовагинитом (старение или дефицит эстрогенов), а также после рождения ребенка. Гиалуроновая кислота, содержащаяся в вагинальном геле **EVA RESTORE® (Эва Рестор)**, создает защитную пленку на слизистой оболочке влагалища. Молочная кислота, содержащаяся в **EVA RESTORE® (Эва Рестор)**, регулирует вагинальный pH до естественного кислотного значения.

ПРОДУКТ	НАЗНАЧЕНИЕ	ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА	СВОЙСТВА
<p><b>EVA RESTORE®</b> (Эва Рестор) Вагинальный гель, содержащий гиалуроновую кислоту</p>	<p>Регенерирование и лечение слизистой оболочки влагалища. Восстановление естественного кислотного баланса во влагалище</p>	<p>Для всех возрастных групп</p>	<p>Гиалуроновая кислота, содержащаяся в продукте, создает защитную пленку, которая помогает вагинальному эпителию регенерировать путем усиления своей естественной регенеративной способности, сохраняя при этом естественную влажность влагалища, благодаря своей сильной гидрофильности. Гель <b>EVA RESTORE® (Эва Рестор)</b> также регулирует вагинальный pH до естественного кислотного значения, создавая благоприятные условия для развития полезной микрофлоры</p>

#### ДОЗИРОВКА

**Терапевтическое использование:** для улучшения заживления поврежденной или атрофированной слизистой оболочки влагалища – 1 раз в день в течение 7 дней (или по предписанию врача), предпочтительно на ночь, перед сном.

**Профилактическое использование:** для усиления механизма защиты тонкого вагинального эпителия, особенно в период менопаузы – 1 раз в день в течение 3 дней, каждые 10 дней, предпочтительно на ночь, перед сном.

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- 1 Удерживайте аппликатор за широкий конец. Направьте узкий конец аппликатора вниз и встряхните его 5–6 раз, чтобы содержимое аппликатора переместилось к кончику.
- 2 Удерживайте аппликатор кончиком вниз и отломайте защитный колпачок на кончике, чтобы открыть аппликатор (рисунок 1).
- 3 Находясь в положении лежа, вставьте кончик аппликатора глубоко во влагалище (рисунок 2) и нажмите на широкий конец аппликатора, чтобы внести необходимое количество геля **EVA RESTORE® (Эва Рестор)**. Удерживайте аппликатор в нажатом состоянии и извлеките из влагалища.
- 4 Если вы не использовали весь объем геля **EVA RESTORE® (Эва Рестор)**, содержащегося в аппликаторе, не храните его для дальнейшего использования. Неиспользованный продукт следует выбросить.
- 5 Любое количество геля **EVA RESTORE® (Эва Рестор)**, которое может вытечь из влагалища после нанесения, можно легко удалить, протерев вульву сухой бумажной салфеткой.

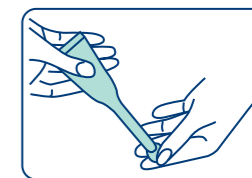


Рисунок 1

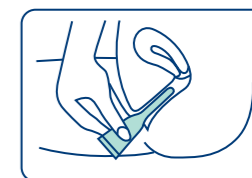


Рисунок 2

#### СОСТАВ

Дистиллированная вода, масло календулы лекарственной, масло ромашки лекарственной, симульгель НС, альфа-глюкан олигосахарид, гидроксиэтилцеллюлоза, центелла азиатская, гиалуронат натрия, метилпарабен, молочная кислота (90%), масло чайного дерева, алоэ вера порошок (200:1).

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

После применения **EVA RESTORE® (Эва Рестор)** во влагалище может ощущаться временное жжение вследствие восстановления pH до кислого значения. Это не является противопоказанием для дальнейшего применения средства. При следующем применении средства жжение обычно пропадает. В случае продолжительного дискомфорта или раздражения рекомендуется прекратить применение средства и обратиться к врачу. Хранить при комнатной температуре (от +15°C до +25°C) в защищенном от света месте, вдали от детей.

#### ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА И УПАКОВКА

Вагинальный гель 9 предзаполненных заполненных одноразовых аппликаторов массой 5 г.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:



«INTERMED S.A.»  
IOULIA & IRENE TSETI Pharmaceutical Laboratories S.A.  
27 Kalyftaki str, 145 64 Kifissia- GREECE, ГРЕЦИЯ  
тел.: +30-210-6253905, факс.: +30-210-6253906,  
e-mail: [intermed@intermed.com.gr](mailto:intermed@intermed.com.gr) -  
[www.intermed.com.gr](http://www.intermed.com.gr)



Произведено в ЕС в соответствии с требованиями надлежащей медицинской практики (GMP)



EVAPHARM

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителя:  
ООО «ЭВАФАРМ», Россия, 127576 г. Москва, ул. Новгородская, д. 1, корпус Г, офис 214.  
Тел.: +7 495 789 48 96,

Эл. почта: [info@evapharm.ru](mailto:info@evapharm.ru),  
[www.evapharm.ru](http://www.evapharm.ru)



Свидетельство о государственной регистрации  
№ RU.77.99.55.001.E.009065.11.13  
от 14.11.2013 г.

Срок годности: 3 года.  
Годен до: см. на упаковке.